


# Garfo para desdentado

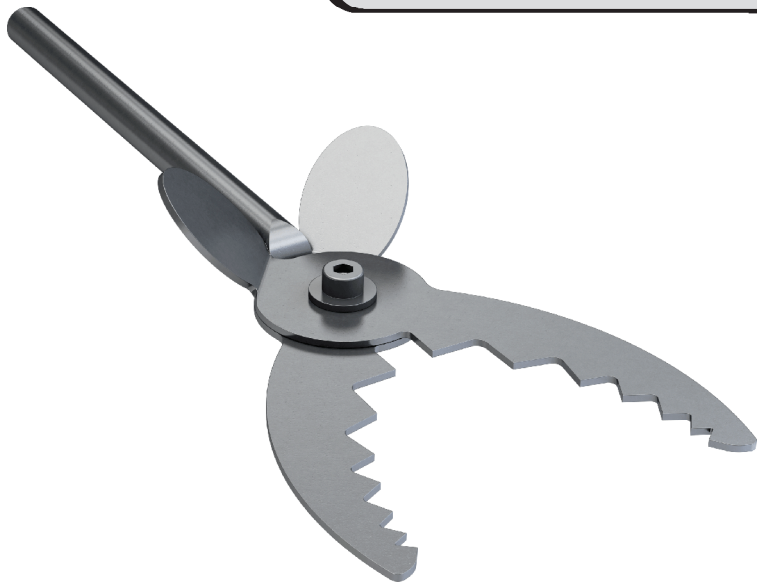

 **bio.art**  
soluções inteligentes

CE

---

**MANUAL DO USUÁRIO**

---

# Índice

<b>1-Introdução.....</b>	<b>01</b>
<b>2-Conteúdo da embalagem.....</b>	<b>01</b>
<b>3-Instalação.....</b>	<b>01</b>
<b>4-Instruções de uso.....</b>	<b>02</b>
<b>5-Problemas e soluções.....</b>	<b>02</b>
<b>6-Manutenção e limpeza.....</b>	<b>02</b>
<b>7-Especificações técnicas.....</b>	<b>03</b>
<b>8-Simbologia.....</b>	<b>03</b>
<b>9-Termo de garantia e assistência técnica.....</b>	<b>03</b>
<b>10-Assistência técnica autorizada.....</b>	<b>04</b>
<b>11-Representante autorizado na Europa.....</b>	<b>04</b>

# Introdução

Obrigado por escolher um produto da Bio-Art.

O garfo para desdentado é um acessório do Arco Facial que possui duas abas reguláveis para adaptação no rebordo alveolar de desdentados totais (plano de cera), como também para pacientes dentados com diferentes largura de arco dental.

Foi idealizado e construído através de experiências clínicas realizadas na Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru pelo Prof. Dr. Conti.


## 2 Conteúdo da Embalagem

- 01- Garfo para desdentado
- 01- Chave Allen 2.5mm
- 01- Manual de instruções



## 3 Instalação

O garfo para desdentado é um acessório para ser usado no Arco Facial Standard Bio-Art, substituindo o Garfo para Dentado. O ajuste e fixação das abas é feito através da chave Allen 2.5mm que acompanha o produto, conforme a figura abaixo.

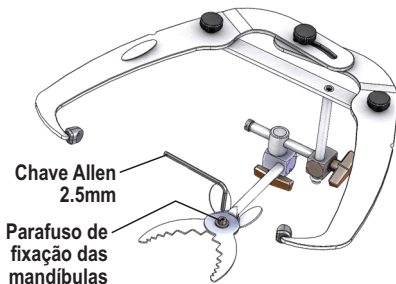

## 4 Instruções de Uso

O garfo para desdentado possui duas abas reguláveis para adaptação no rebordo alveolar de desdentados totais (plano de cera), como também para pacientes dentados com diferentes larguras de arco dental.



**Nota:** Este manual contém somente as informações básicas e simplificadas com relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. O Garfo para Desdentado constitui um produto destinado ao uso somente por profissionais especialmente qualificados na área, ficando estes totalmente responsáveis pela técnica utilizada.

## 5 Problemas e Soluções

PROBLEMAS	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Dificuldade de aperto e/ou de liberação das abas do Garfo.	Resíduos, sujeira, ou oxidação do parafuso de aperto das garras.	Mantenha sempre limpos e levemente lubrificados com lubrificante neutro o parafuso de aperto e a rosca das abas.
Dificuldades de aperto e fixação das abas.	Roscas do parafuso de fixação ou das garras danificados.	Substitua o parafuso, entre em contato com a rede de Assistência Técnica Autorizada Bio-Art.

## 6 Manutenção e Limpeza

- 1- Para a limpeza do Garfo para Desdentados use apenas pincel fino, pano seco e não use solventes, detergentes ou produtos químicos;
- 2- Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte, se necessário utilize uma espátula plástica;
- 3- Lubrifique quando necessário as roscas do parafuso de fixação das abas com pequena quantidade de lubrificante neutro.
- 4- Com exceção da lubrificação, nenhuma manutenção deve ser feita pelo usuário, utilize sempre uma Assistência Técnica Autorizada

## 7 Especificações Técnicas

Principais materiais utilizados na fabricação do Garfo para Desdentado:  
Abas, arruela e parafuso de fixação: Aço Inox SAE-304.

Chave Allen 2.5mm: Aço carbono com acabamento superficial niquelado.

Peso do conjunto: 40 gramas.

## 8 Simbologia

 <i>Consultar Instruções para Uso</i>	 <i>Atenção!</i>	 <i>Número de Série</i>	 <i>Código do Modelo</i>
 <i>Representante Autorizado na Comunidade Européia</i>	 <i>Data de Fabricação</i>	 <i>Dados do Fabricante</i>	 <i>Manter em local seco</i>
 <i>Este lado para cima</i>	 <i>Frágil</i>	 <i>Empilhamento Máximo</i>	

## 9 Termos de garantia e assist. técnica

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da respectiva Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

### Limitações da garantia:

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;



### Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará

CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502

CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)

## IO Assistência Técnica Autorizada

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:

[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)

## II Representante Aut. na Europa

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)





---

**Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000  
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502  
[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) - [facebook.com/bioartequipamentos](https://facebook.com/bioartequipamentos)**

---