


Placa de Montagem Trilho



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

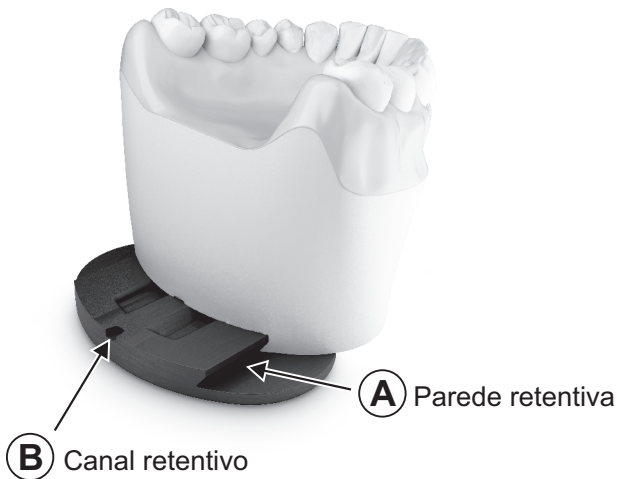

A Placa de Montagem Trilho Bio-Art foi desenvolvida especialmente para possibilitar a remoção do modelo de gesso sem a necessidade de quebrá-lo, o que acontece com a maioria das placas de montagem convencionais.

Para um funcionamento adequado, deve-se tomar alguns cuidados na montagem e retirada do modelo, conforme procedimento:

- 1) Durante a montagem, coloque gesso preenchendo todo o espaço interno formado entre as paredes retentivas **(A)** e a base do design trilho, garantindo uma melhor retenção do modelo;
- 2) O acabamento do modelo na borda lateral da placa de montagem, deverá ficar isenta de gesso em toda sua extensão, para garantir seu destacamento e deslizamento durante a retirada;
- 3) Antes da retirada do modelo, deve-se remover o gesso contido no canal retentivo **(B)** da placa utilizando ferramenta pontiaguda (ex.: Lecron). Este orifício de retenção tem a função de evitar que o modelo saia espontaneamente da placa de montagem durante o trabalho com articulador;
- 4) Depois de retirado todo o gesso contido no orifício de retenção, deve-se segurar firmemente o modelo e aplicar uma pequena batida na borda da placa obedecendo o sentido indicado pelas setas localizadas na face inferior da placa. Esta operação fará com que a placa se destaque do gesso e fique livre para que possa deslizar facilmente para fora do modelo.

Obs.: Uma vez retirado o modelo da placa de montagem trilho, não garantimos a sua recolocação com a mesma precisão da posição inicial de trabalho, já que esta depende totalmente da qualidade técnica do trabalho bem como da qualidade dos materiais utilizados no processo (gesso).

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000

São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953 - www.bioart.com.br