




## PLACA DE MONTAGEM MAGNÉTICA

### Instruções de Montagem

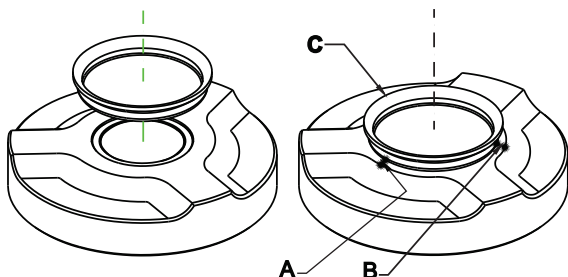

**O POSICIONAMENTO DA CHAPA DE MONTAGEM NA PLACA DEVE SER CONCÊNTRICO. ORIENTE-SE PELAS MARGENS LATERAIS (A, B e C), QUE DEVEM SER IGUAIS.**

As placas de montagem magnéticas foram desenvolvidas para permitir uma rápida troca dos modelos de gesso no articulador (sem parafusos), proporcionando praticidade e maior agilidade no trabalho, com vários casos ao mesmo tempo. O uso destas placas eliminam a necessidade de quebra dos modelos de gesso.

Para evitar acúmulo de gesso no conjunto magnético, a chapa de montagem deve ser montada de forma concêntrica em relação à placa magnética conforme orientação da figura ilustrativa.

A Bio-Art não se responsabiliza por eventuais problemas ou distorções, caso não sejam utilizadas chapas de montagem originais Bio-Art durante os trabalhos.

**Obs.: As placas de montagem magnéticas não são intercambiáveis.**



---

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil  
Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953  
[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)