


RéguaFox

manual do usuário

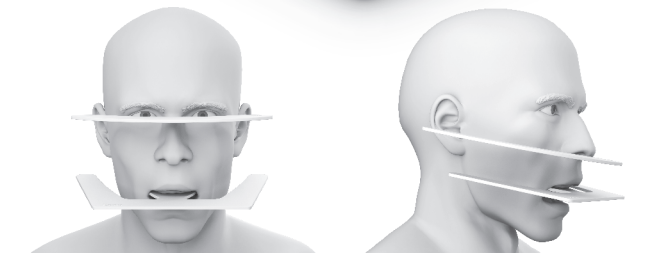

 bio·art

CE

▶ ÍNDICE ◀

1-Introdução.....	01
2-Conteúdo da embalagem.....	02
3-Instruções de uso.....	03
4-Problemas e soluções.....	04
5-Manutenção e Limpeza.....	05
6-Especificações técnicas.....	06
7-Precauções de segurança.....	07
8-Condições especiais de armazenamento.....	08
9-Simbologia.....	09
10-Termo de garantia e assistência técnica.....	10
11-Assistência técnica autorizada.....	11
12-Representante autorizado na Europa.....	12

▶ 1-INTRODUÇÃO ◀

A Régua Fox da Bio-Art é um acessório utilizado no ajuste do rolete de cera superior nas próteses totais para a determinação e a avaliação dos planos oclusais de Camper e horizontal (interpupilar).

O conjunto da régua é formado por duas peças distintas, o modelo 01 (Régua Fox propriamente dita), que possui formato anatômico para ser adaptado intra oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio extra-oral do paciente o plano deste rolete; e o modelo 02 (arco) para comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de cera. Ver figuras 01 e 02.

A Bio-Art fabrica a Régua Fox em dois tipos de materiais: alumínio anodizado ou injetadas em policarbonato. Apesar de materiais distintos sua utilização para ambos os materiais são idênticas.

Tanto as régua de alumínio ou as injetadas em policarbonato, podem ser esterilizadas em autoclave, porém, verifique as temperaturas e os tempos corretos de esterilização no capítulo 06-Manutenção e limpeza.

Figura 01:
Régua Fox (parte 01)



Figura 02
Régua em Arco (parte 02)



**Por favor. Leia as instruções contidas neste manual,
antes de utilizar o produto.**

▶ 2-CONTEÚDO DA EMBALAGEM ◀

01 Régua Fox (parte 01), de alumínio ou de policarbonato.

01 Régua em Arco (parte 02), de alumínio ou de policarbonato.

01 Manual de instruções.

Nota:

A Régua Fox Bio-Art partes 01 e 02 não são vendidas separadamente.
As Réguas são opcionais em relação ao material de fabricação, alumínio ou policarbonato.

► 3-CONTEÚDO DA EMBALAGEM ◀

As Réguas Fox da Bio-Art são extremamente simples de serem utilizadas, porém, os procedimentos para sua utilização e seu uso intra-oral devem estar baseados em normas de saúde e segurança e restrito a responsabilidade técnica exclusiva do Cirurgião Dentista ou do profissional responsável.

A Bio-Art se isenta da responsabilidade de qualquer dano causado em decorrência do uso indevido das Réguas Fox.

► 4-PROBLEMAS E SOLUÇÕES ◀

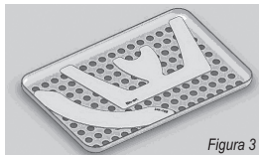
► 5-PRECAUÇÕES E SEGURANÇA ◀**► 6-MANUTENÇÃO E LIMPEZA ◀**

Figura 3

-As Réguas Fox da Bio-Art devem ser lavadas exclusivamente com água e detergente neutro.
-Para esterilização em autoclave, as réguas devem ser acomodadas no interior do tanque com uma das faces totalmente apoiada em uma superfície plana ou na própria superfície plana da bandeja e separadas dos demais

utensílios, principalmente os metálicos, e nunca em posição vertical (ver figura 03). Caso este detalhe não seja observado, a planicidade das régua poderá ser comprometida com possíveis empenamentos, principalmente as de policarbonato.

-As régua de policarbonato podem ser esterilizadas em autoclave desde que não ultrapasse a temperatura de 121°C com tempo nesta temperatura não superior à 20 minutos.

-As régua de alumínio podem ser esterilizadas em autoclave com temperaturas de até 134°C e tempo de 10 minutos.

►7-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO ◀

- Quando não utilizadas, guarde as Régua Fox em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar.

- Sempre que possível, mantenha as Régua na embalagem original.

- Após a esterilização em autoclave as régua devem permanecer na embalagem adequada, (papel Grau cirúrgico) de acordo com a validade do processo de esterilização utilizado.

►8-PROBLEMAS E SOLUÇÕES ◀

Problema	Possível Causa	Solução / Sugestões
Riscos na superfície das régua.	Armazenamento e uso incorretos.	Guarde as régua sobre superfícies não abrasivas e distantes de objetos metálicos. Para limpeza superficial utilize sempre tecido macio.
Trincas ou manchas na superfície das régua.	Manuseio, limpeza e esterilização incorretos ou ação de agentes externos ou produtos químicos.	Para limpeza utilize apenas sabão neutro e água corrente. Para esterilização em autoclave ver capítulo 6, manutenção e limpeza.
Alterações na cor das régua.	Limpeza inadequada. Armazenamento inadequado.	Mantenha as régua distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar. Ver capítulo 6, manutenção e limpeza.
Deformações superficiais e empenamento das régua.	Ação de raios solares. Limpeza e esterilização inadequadas.	Mantenha as régua distantes de fontes de calor excessivo e luz solar. Para esterilização em autoclave, as régua devem ser acomodadas no interior do tanque com uma das faces totalmente apoiada em uma superfície plana. Ver capítulo 6, manutenção e limpeza.

►9-TERMEDE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ◀

A Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de 1 ano, contado a partir da data de aquisição do produto (nota fiscal de compra). A garantia é concedida exclusivamente pelo distribuidor autorizado e inclui defeito de fabricação, sendo prestada mediante o concerto e condicionada aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no presente manual;
- A reclamação seja acompanhada da nota fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número de série do produto ou lote de fabricação;
- O equipamento seja manejado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente.

Estão excluídos da garantia defeitos por:

- Desgaste natural das peças;
- Mau-uso, golpes e quedas acidentais;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgaste por exposição e condições adversas (umidade, frio ou calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados.

Em caso de dúvidas, por favor consultar o fabricante:

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará

CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953

CNPJ 58.538.372/0001-56 - I.E. 637.034.447.113

Home Page: www.bioart.com.br - E-mail: bioart@bioart.com.br

► 10-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA ◀

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:

www.bioart.com.br

Em caso de dúvidas, por favor consultar o fabricante:



Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000
São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502
Home Page: www.bioart.com.br E-mail: bioart@bioart.com.br