

Mesa Incisal

Metálica Ajustável



 **bio·art**
soluções inteligentes

CE

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

1-Introdução.....	01
2-Conteúdo da embalagem.....	01
3-Instalação.....	01
4-Instruções de uso.....	01
5-Problemas e soluções.....	02
6-Manutenção e limpeza.....	02
7-Especificações técnicas.....	02
8-Simbologia.....	03
9-Termo de garantia e assistência técnica.....	03
10-Assistência técnica autorizada.....	04
11-Representante autorizado na Europa.....	04

1 Introdução

Obrigado por escolher um produto da Bio-Art.

A Mesa Incisal metálica ajustável foi desenvolvida pela Bio-Art para ser utilizada em seus articuladores em trabalhos específicos com a técnica preconizada por cada profissional.

É construída em alumínio injetado e superficialmente niquelada, garantindo proteção contra oxidações e robustez.

2 Conteúdo da Embalagem

01 Mesa Incisal metálica ajustável com manipululo de fixação

01 Chave Allen 2.5mm e manual de instruções.



Manipulo de Fixação

3 Instalação

Retire a Mesa Incisal padrão (acrílica) do articulador e instale no mesmo local a Mesa Incisal Metálica Ajustável conforme figuras abaixo.



4 Instruções de Uso

A Mesa Incisal Ajustável é utilizada no articulador para os trabalhos do processo de “balanceamento dos dentes”, permitindo a personalização da guia anterior através de suas paredes laterais e plano antero-posterior ajustáveis.



Nota: Este manual contém somente as informações básicas e simplificadas com relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. A Mesa Incisal Ajustável constitui um produto destinado ao uso somente por profissionais especialmente qualificados na área ficando estes totalmente responsáveis pela técnica utilizada.

5 Problemas e Soluções

PROBLEMAS	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Instabilidades na fixação da Mesa Incisal metálica no Articulador.	Resíduos ou sujeira no ramo inferior ou na face de apoio da Mesa.	Antes de fixar a Mesa, limpe sempre sua face de apoio e o ramo inferior do Articulador.
Dificuldades de movimentos das partes móveis da Mesa Incisal ajustável.	Parafusos danificados ou acúmulo de resíduos nas partes móveis.	Mantenha as partes móveis sempre limpas. Substitua os parafusos danificados, entre em contato com a rede de Assistência Técnica Autorizada Bio-Art.

6 Manutenção e Limpeza

1. Para a limpeza utilize um pincel macio e um pano limpo umedecido em álcool 70%, não use solventes, detergentes ou produtos químicos;
2. Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte, caso seja necessário utilize apenas espátula plástica;
3. Não deixe a Mesa Incisal Ajustável exposta em temperaturas elevadas ou umidade excessiva.
4. Para qualquer manutenção utilize sempre a Rede de Assistência Técnica autorizada Bio-Art.

7 Especificações Técnicas

Principais materiais utilizados na fabricação da Mesa Incisal Metálica Ajustável:

Conjunto da Mesa: alumínio com acabamentos superficiais anodizado, molas de aço carbono;

Manipulo de fixação: Manipulo de PA injetado em inserto de latão;
Movimentos das mandíbulas laterais: Máximo 40°;
Movimento do giro sobre a mesa: 0 a 10° 0 a 30°;

Peso: 50 gramas.

8 Simbologia

 <i>Consultar Instruções para Uso</i>	 <i>Atenção!</i>	 <i>Número de Série</i>	 <i>Código do Modelo</i>
 <i>Representante Autorizado na Comunidade Europeia</i>	 <i>Data de Fabricação</i>	 <i>Dados do Fabricante</i>	 <i>Manter em local seco</i>
 <i>Este lado para cima</i>	 <i>Frágil</i>	 <i>Empilhamento Máximo</i>	

9 Termos de garantia e assist. técnica

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da respectiva Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;



Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará

CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502

CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

www.bioart.com.br

IO Assistência Técnica Autorizada

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:

www.bioart.com.br

II Representante Aut. na Europa

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net





**Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos**
