
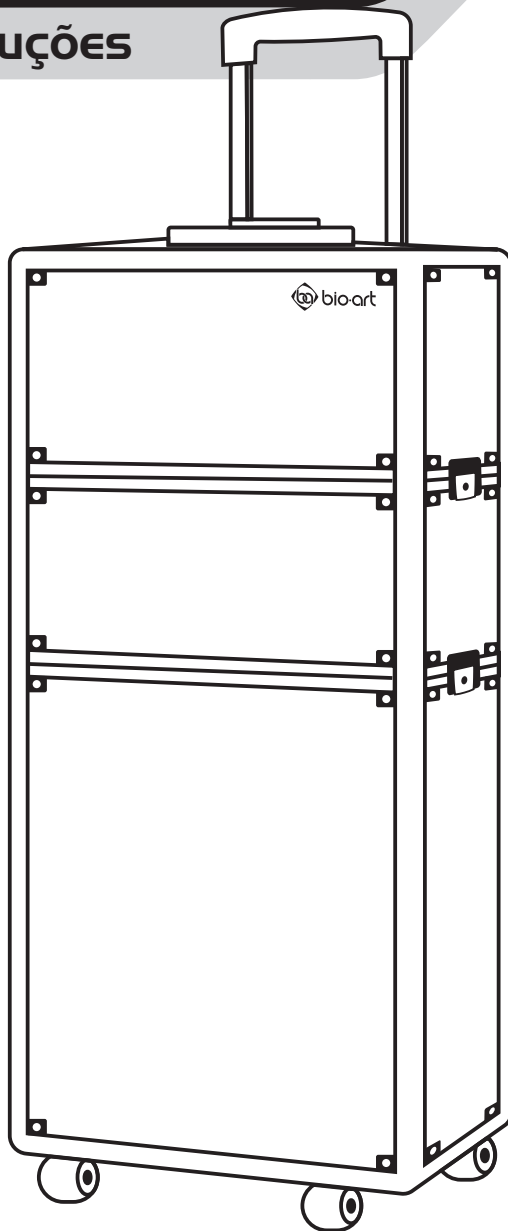


# BioCase

manual de instruções

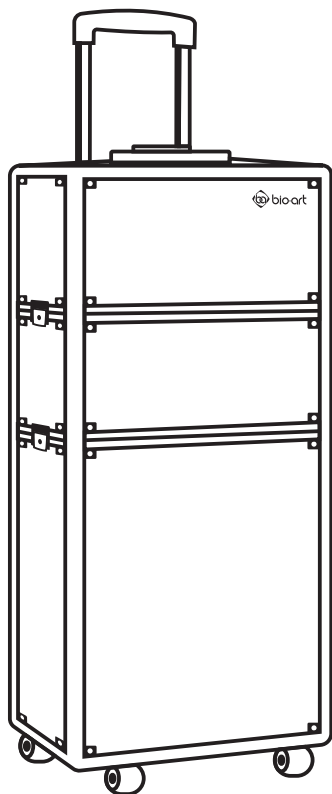

**bio·art**  
soluções inteligentes

## ▶ **ÍNDICE** ◀

1 - Introdução.....	01
2 - Especificações técnicas.....	01
3 - Conteúdo da embalagem.....	02
4 - Descrição dos componentes.....	02
5 - Identificação da maleta BioCase.....	02
6 - Limpeza e armazenamento.....	03
7 - Termo de garantia e assistência técnica.....	03
8 - Assistência técnica autorizada.....	03

## ▶ **1 - INTRODUÇÃO** ◀

A Maleta BioCase foi especialmente desenhada para transportar, guardar e proteger materiais, equipamentos e acessórios utilizados tanto na área odontológica como demais áreas da saúde. No entanto estão indicadas também para profissionais de diversas áreas como manicures, maquiadores, tatuadores, entre outros.



**Atenção! Para que você tenha um melhor aproveitamento e durabilidade de sua maleta, recomendamos que leia este manual de instruções antes de começar a utilizar o produto.**

## ▶ **2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** ◀

### **Material:**

Estrutura e puxador: alumínio anodizado;

Tampa e compartimentos: MDF;

Bandejas, divisórias, rodas, alça e manopla do puxador: plásticos.

### **Dimensões:**

Sem embalagem.....(CxLxH) 350mm x 250mm x 680mm.

Com embalagem.....(CxLxH) 400mm x 300mm x 750mm.

### **Peso:**

Sem embalagem.....5,6Kg.

Com embalagem.....7,2Kg.

### **Peso máximo de carga:**

Compartimento central.....10 Kg.

Compartimento superior.....5 Kg.

### ► 3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM


01 Maleta BioCase

01 Tampa adicional pequena

01 Bandeja plástica

02 Cópias de chaves

01 Manual de instruções

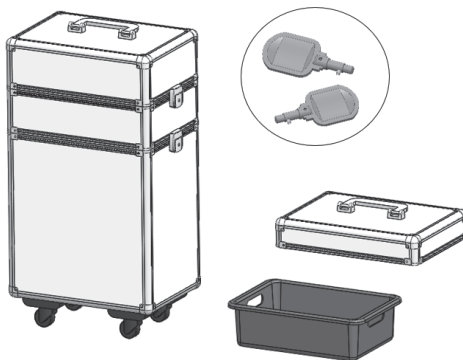

### ► 4 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

[01] Maleta BioCase

[02] Compartimento central

[03] Bandeja com divisórias

[04] Bandeja plástica

[05] Compartimento inferior

[06] Rodinhas com giro de 360°


[07] Fechadura

[08] Chaves (2 unidades)

[09] Tampa adicional para compartimento inferior

[10] Puxador telescópico

[11] Cinta de fixação do puxador

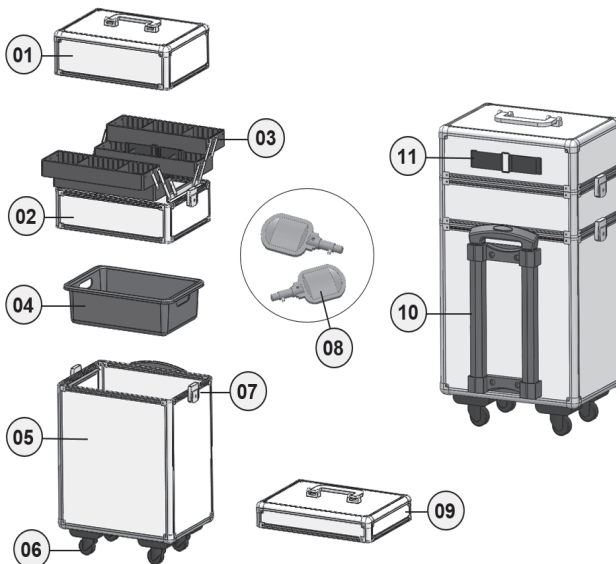

### ► 5 - IDENTIFICAÇÃO DA MALETA BIOCASE

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.  
Rua Teotonio Vilela, 120 - Jardim Tangará  
13568-000 - São Carlos/SP - Brazil  
Fone: +55 16 3371-6502  
E-mail: bioart@bioart.com.br



**MALETA ACADÊMICA BIOCASE BRANCA**

**LOT** XXXXXX

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.  
Rua Teotonio Vilela, 120 - Jardim Tangará  
13568-000 - São Carlos/SP - Brazil  
Fone: +55 16 3371-6502  
E-mail: bioart@bioart.com.br



**MALETA ACADÊMICA BIOCASE MARROM**

**LOT** XXXXXX

Modelo da etiqueta indelével de identificação do produto localizada na parte posterior da maleta para identificação das informações técnicas.

## ▶ 6 - LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Para assegurar uma maior durabilidade da Maleta BioCase é altamente recomendável que:

- Durante a limpeza utilize apenas pano úmido com sabão neutro. Não utilizar esponjas abrasivas e nem álcool ou qualquer outro solvente;
- Mantenha ao máximo a Maleta BioCase isenta de sujeira, seca, distante de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar direta.

## ▶ 7 - TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de 6 meses para a Maleta BioCase, contado a partir da data de aquisição do produto (nota fiscal de compra). Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de concerto do produto e condicionada aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no presente manual de instrução;
- Que a reclamação seja acompanhada da nota fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número de série do produto ou lote de fabricação;
- Que o produto seja manejado, transportado e armazenado com cuidado;

### Limitações da garantia:

- Desgaste natural do produto;
- Mau uso, golpes e quedas acidentais;
- Transporte inadequado;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição e condições adversas (umidade, frio ou calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;
- Reparo por pessoas não autorizadas;

Para usufruir desta garantia no mercado nacional (Brasil), o consumidor deverá enviar o produto, por seus custos, para o endereço abaixo.

### Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.


Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil  
Tel. +55 (16) 3371-6502 - CNPJ 58.538.372/0001-56 - I.E. 637.034.447.113  
Home Page: [www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) - E-mail: [assistenciatecnica@bioart.com.br](mailto:assistenciatecnica@bioart.com.br)




Para demais países, a garantia é fornecida exclusivamente pelo distribuidor autorizado (importador legal).

## ▶ 8 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em [www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) - *As informações contidas neste manual estão sujeitas às mudanças que poderão ser realizadas sem prévio aviso.*

 **BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

 Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim  
Tangará - CEP 13568-000  
São Carlos - SP - Brasil

 (16) 3371-6502  
 [www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)  
 [bioart\\_solucoes\\_inteligentes](https://www.instagram.com/bioart_solucoes_inteligentes)