

ProFace

manual do usuário



▶ **ÍNDICE** ◀


1. INTRODUÇÃO.....	1
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	2
3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
4. INSTRUÇÕES DE USO.....	3
5. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	4
7. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO.....	4
8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	4
9. SIMBOLOGIA.....	5
10. TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	5
11. REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA.....	5
12. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.....	5

▶ **1 - INTRODUÇÃO** ◀



O ProFace Bio-Art é um EPI (equipamento de proteção individual) desenvolvido para ser utilizado onde haja a necessidade de proteger os olhos e face do usuário contra respingos de saliva, líquidos, aerossóis, poeiras e partículas em geral. Suas principais características são: ergonomia, leveza, praticidade e fácil higienização. O ProFace Bio-Art possui uma fácil manutenção com a troca da viseira oferecendo uma excelente relação custo benefício.

Antes de utilizar o ProFace, leia as instruções contidas neste manual.

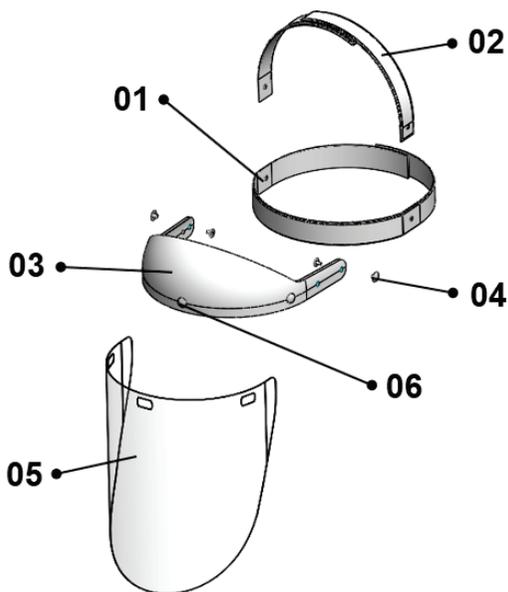

01 – Cinta de fixação

02 – Cinta de topo

03 – Testeira

04 – Rebites de fixação

05 – Viseira de proteção

06 – Trava de fixação da viseira

► 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ◀

Material

Cinta.....Cinta de PP revestida com filme de PVC

Testeira.....PP

Viseira de proteção.....PETG

Fixador da cinta.....Velcro

Mecanismo móvel.....Rebite de latão cromados

Dimensões

(CxLxH) 25,0 x 19,0 x 30,0cm

Dimensões da embalagem

(CxLxH) 19,0 x 11,0 x 27,0cm

Peso

Sem embalagem.....140g

Com embalagem.....150g

► 3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM ◀

01 Protetor Facial ProFace;


01 Manual de instruções.

► 4 - INSTRUÇÕES DE USO ◀


O ProFace Bio-Art é um instrumento extremamente simples de ser utilizado. Solte os velcros das cintas (01 e 02) e ajuste-as na cabeça na altura da testa fixando-as novamente com os velcros até que o ProFace esteja seguro e confortável.



No momento que estiver com a cabeça abaixada, caso a viseira (05) toque o peito, ajuste-a empurrando a testeira (03) para cima.

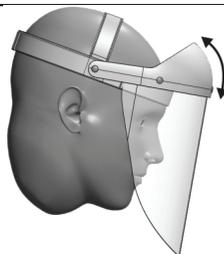

Para a troca da viseira, gire seus três botões de fixação (06) até a posição horizontal dos mesmos, deixando-a livre para a remoção e/ou colocação de uma nova viseira. Após a troca, gire novamente os três botões (06) na posição vertical para sua fixação.

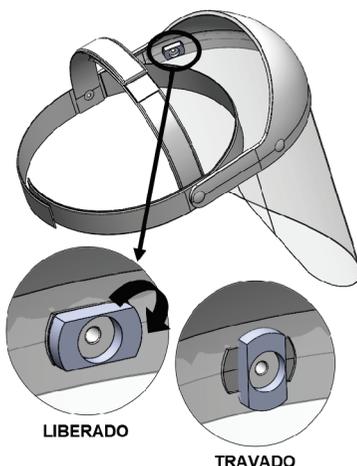

► 5 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ◀



- Este produto é de uso pessoal e intransferível evitando assim a possibilidade de contaminação cruzada, oftálmica ou dermatológica.

- Como qualquer outro EPI, o ProFace deve ser somente utilizado por pessoas cientes quanto a suas aplicações, limitações, inspeção, limpeza, manutenção e armazenamento corretos;

- Caso ocorra danos no ProFace, utilize apenas peças originais Bio-Art que podem ser adquiridas através da assistência técnica autorizada, desta forma a garantia de qualidade do produto será preservada;

► 6 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ◀



- A limpeza de rotina do ProFace deve ser feita com lenços de papel ou tecido macio;
- Quando necessário, o ProFace poderá ser lavado exclusivamente com água e detergente comprovadamente neutro, não devendo ser utilizado qualquer outro tipo de produto químico ou esponjas.
- Para a desinfecção utilize álcool 70% em pequena quantidade.

► 7 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO ◀

- Quando não utilizado, guarde o ProFace em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar;
- Sempre que possível, mantenha o ProFace em sua embalagem original.

► 8 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES ◀

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO/SUGESTÕES
Movimentos verticais da viseira com instabilidade de equilíbrio.	Rebite frouxo.	Entre em contato com a assistência técnica autorizada.
Testeira quebrada.	Manuseio incorreto.	Entre em contato com a assistência técnica autorizada.
Riscos na viseira	Limpeza inadequada. Armazenamento Inadequado.	Para evitar riscos na viseira utilize para a limpeza lenços de papel ou tecido macio de uso óptico. Quando não utilizado, guarde o ProFace em local seco, isento de poeira e distantes de produtos químicos.
Testeira e/ou cintas amareladas	Ação de raios ultravioletas.	Para a troca da testeira ou da cinta, entre em contato com a assistência técnica autorizada. Nota: Mantenha sempre o ProFace distante de fontes de calor excessivo ou luz solar.

► 9 - SIMBOLOGIA



► 10 - TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de seis meses à partir da data de compra, abrangendo todo e qualquer defeito de fabricação e será prestada mediante a substituição do produto e condicionada aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido transportado, armazenado e utilizado corretamente de acordo com as instruções fornecidas;
- Que a reclamação seja acompanhada da Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com a descrição do defeito e número de lote de fabricação;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural das lentes;
- Defeitos decorrentes do uso ou armazenamento incorreto do produto;
- Transporte inadequado;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Danos por exposição a condições adversas (umidade, calor intenso, interação química, etc.);
- Limpeza e/ou desinfecção com produtos inadequados.

Para usufruir desta garantia no mercado nacional (Brasil), o consumidor deverá enviar o produto, por seus custos, para o endereço abaixo ou à Assistência Técnica Autorizada Bio-Art mais próxima. Consulte sobre os postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site: www.bioart.com.br.



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 - assistenciatecnica@bioart.com.br
CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

Para demais países, a garantia é fornecida exclusivamente pelo distribuidor autorizado (importador legal).

► 11 - REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA

Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53 - 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

As informações contidas neste manual estão sujeitas às mudanças que poderão ser realizadas sem prévio aviso.

► 12 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site: www.bioart.com.br



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

📍 Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim
Tangará - CEP 13568-000
São Carlos - SP - Brasil

☎ (16) 3371-6502
🌐 www.bioart.com.br
📷 [bioart_solucoes_inteligentes](https://www.instagram.com/bioart_solucoes_inteligentes)